


販売名：パラコス プロ用 オプション

【警告】
 滅菌機器やデバイスを取り扱う際は病院の規定に従うこと。

【禁忌・禁止】
 再利用禁止。

【形状、構造及び原理等】
 本品は滅菌済みのノズルである。ノズル単品、ノズルとプレッシャライザのセットの2種類がある。
 本品は、付属品と組み合わせて使用することにより、骨セメントを混和する。

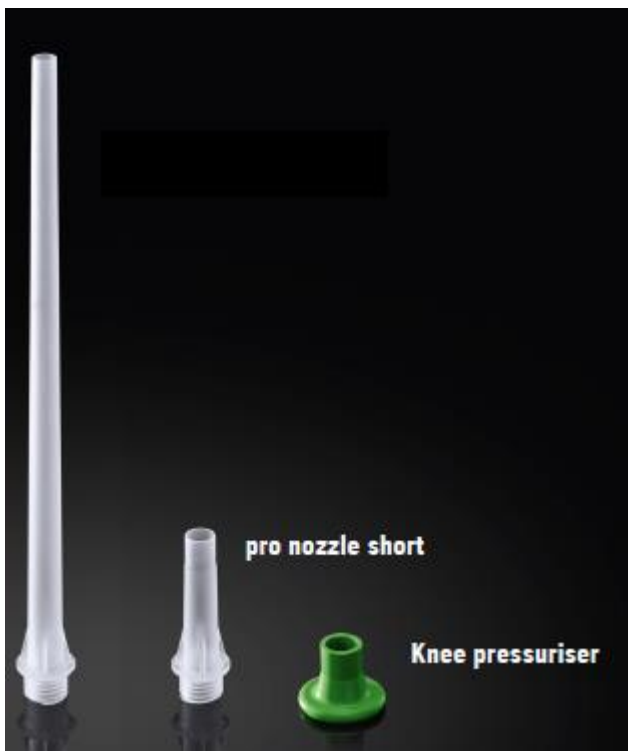


写真： 左・リビジョンノズル/中・右 ショートノズル&膝プレッシャライザー

製品名	カタログ No.
パラコス プロ用 リビジョンノズル	66054436
パラコス プロ用 ショートノズル&膝プレッシャライザー	66057202


※ 本品は、パラコスR ボーンセメント (製造販売承認番号：23000BZX00172000)、及びパラコスR+G ボーンセメント (製造販売承認番号：30100BZX00180000) の製品群のうち、一体型製品「パラコスR ボーンセメント プロ」及び「パラコスR+G ボーンセメント プロ」の専用オプション品である。
 ※ 「パラミックス バキュームミキシングシステム」(製造販売届出番号：04B1X10001000007) 及び「パラミックス バキュームミキシングシステム Duo」(製造販売届出番号：04B1X10001000016) には使用できない。

【使用目的、効能又は効果】
 整形外科用(骨)セメント又は人工骨インプラントを練和又は混和する器具をいう。本品は単回使用である。


【操作方法又は使用方法】

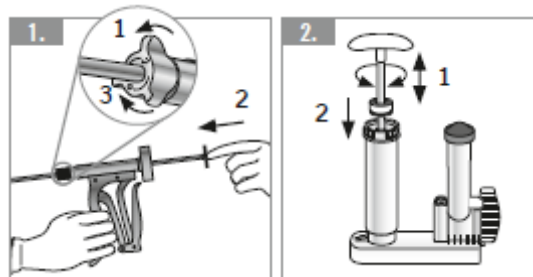


- セメントガンのロックを解除して、ロッドを止まるまで後ろにスライドさせる。その後再度ロックをかける。
- ミキシングロッドを2回程度動かして圧縮されている粉末をほぐし、初期位置に戻す。カートリッジに蓋を押し込む。

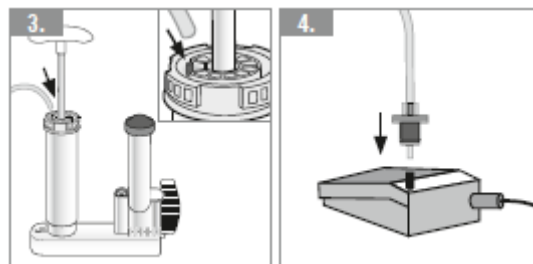


- バキュームホースを蓋に接続する。
- 活性炭フィルターをバキュームポンプに接続する。

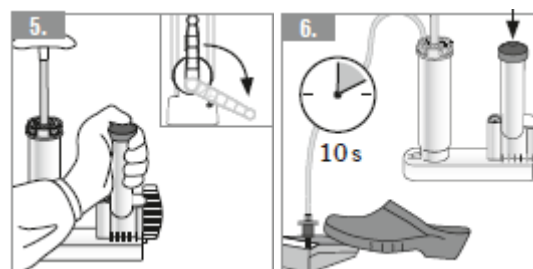


- 左の親指で緑色の柔らかい蓋(インジケータ)を押さえた状態で、右手で緑色のレバーを完全に下げる。
- バキュームポンプを作動させると液体モノマーが移動する。緑色の蓋(インジケータ)が収縮するとモノマーの移動は完了する(約10秒)。バキュームポンプは作動させたままにする。

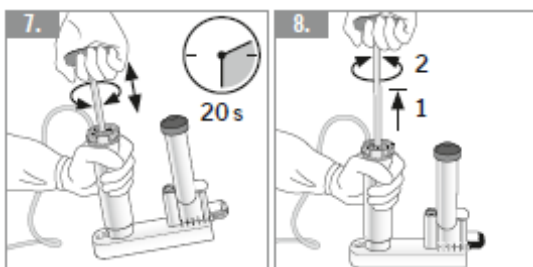


7. 生地が均質になるまで、カートリッジの全長に渡って少なくとも 20 秒間（1 秒間に 1 回のストローク）、ミキシングロッドを回転させながら上下してセメントを混合する。
8. ミキシングロッドを止まるまで引き上げ、軽く左右に回す。

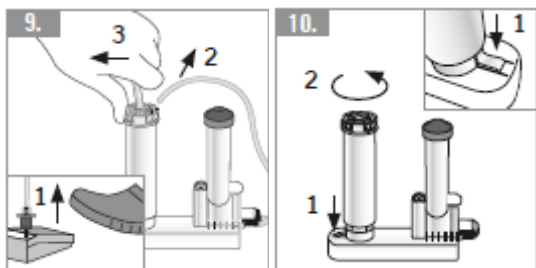


9. 真空ポンプのスイッチを切り、真空ホースを取り外す。その後ミキシングロッドを所定の破断点で折る。
10. カートリッジ固定装置を押し下げ、カートリッジをねじりながら外す。

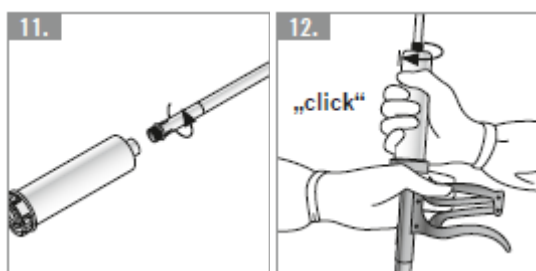

11. アプリケーションノズルをカートリッジに装着する。
12. 時計方向に回してカートリッジをセメントガンに取り付ける。

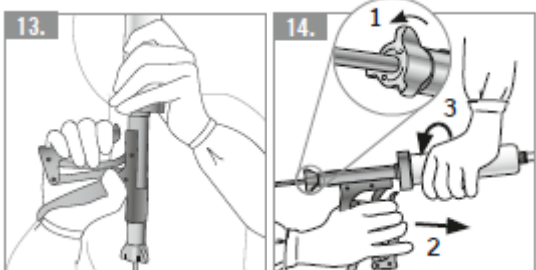

13. ノズルの先端までセメントを押し出す。
14. 使用後は、セメントガンのグリップを握りながらロックを元に戻す。その後グリップを離し、カートリッジを外す。

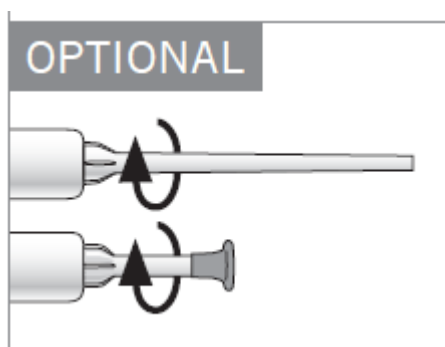

- ・ 上：本品（リビジョンノズル）を取り付けた例
- ・ 下：本品（ショートノズルと膝プレッシャライザー）を取り付けた例

【貯蔵・保管方法】

本製品は清潔且つ乾燥した場所に保管すること。
有効期限を過ぎて使用しないこと。滅菌済みパッケージに破損がある場合は使用しないこと。

【取り扱い上の注意】

本製品を機能目的以外に使用の場合、破損のおそれがある。

【包装】

製品名：パラコス プロ用 リビジョンノズル
・リビジョンノズル 1本

製品名：パラコス プロ用 ショートノズル&膝プレッシャライザー
1セット/1袋
・ショートノズル 1本
・膝プレッシャライザー 1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

販売業・貸与業者：
アクアメッドジャパン株式会社
パラコス ジャパン事業部
〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-8-17 6F
TEL: 03-6262-3614

製造販売業者：
アクアメッドジャパン株式会社 宮城県

製造業者：
Heraeus Medical GmbH
Philipp-Reis-Straße 8 / 13
61273 Wehrheim, Deutschland