

PALACOS[®] R+G pro

The gold standard: ready-to-mix



PALACOS® R+G pro

Handling Guideline

作業準備：

- 1.滅菌済のパラミックス セメントガンを準備しておきます。
- 2.パラミックス バキュームポンプとホースを接続します。
- 3.パラコスR+G PROのパックは使用直前までアルミ袋から取り出さないでください。

操作方法：



1. ミキシングロッドを 2 回程度上下に動かし、カートリッジ内の粉末をほぐします。



2. 真空密閉するため、カートリッジの蓋を押し下げ、内筒と同じ高さまで押し込まれていることを確認します。蓋にバキュームホースを接続します。



3. 緑色の柔らかい蓋（インジケータ）を押しながら、緑色のレバーを素早く、完全に下がるまで前方に倒します。注意：緑色のレバーは 2 回カチカチと音がるまで下げてください。この作業はトレイの上で行わないでください。

4.

重要：

A. バキュームポンプを作動させると、約 10 秒で液体モノマーの移動が完了します。

B. バキュームポンプは作動させたままにしてください。ミキシングロッドを左右に回転させながら上下し、生地が均質になるまで少なくとも 20 秒間ミキシングを行ってください。

C. ミキシングが完了したら、バキュームホースを蓋から取り外します。



1. ミキシングロッドをヘッドの部分まで引上げ、ミキシングロッドを所定の破断点で折ります。



2. 固定装置のレバーを押し下げ、カートリッジをゆるめて取り外します。



3. アプリケーションノズルをカートリッジにねじ込んで装着します。



4. カートリッジをセメントガンに取り付け、時計方向に回して固定します。

販売名・承認番号

パラコス R ボーンセメント プロ 7 5 ・ 23000BZX00172000

パラコス R+G ボーンセメント プロ 7 5 ・ 30100BZX00180000

www.heraeus-medical.com