

## 販売名：パラコス プロ用 オプション

### 【警告】

滅菌機器やデバイスを取り扱う際は病院の規定に従うこと。

### 【禁忌・禁止】

再利用禁止。

### \*【形状・構造及び原理等】

本品は滅菌済みのノズルである。ノズル単品、ノズルとプレッシャライザーのセットの2種類がある。

本品は、付属品と組み合わせて使用することにより、骨セメントを混和する。



写真：左・リビジョンノズル/中・右 ショートノズル&膝プレッシャライザー

製品名	カタログ No.
パラコス プロ用 リビジョンノズル	66054436
パラコス プロ用 ショートノズル&膝プレッシャライザー	66057202

※ 本品は、パラコスR ボーンセメント (製造販売承認番号：23000BZX00172000)、及びパラコスR+G ボーンセメント (製造販売承認番号：30100BZX00180000) の製品群のうち、一体型製品「パラコスR ボーンセメント プロ」及び「パラコスR+G ボーンセメント プロ」の専用オプション品である。

※ 「パラミックス バキュームミキシングシステム」(製造販売届出番号：04B1X10001000007) 及び「パラミックス バキュームミキシングシステム Duo」(製造販売届出番号：04B1X10001000016) には使用できない。

### 包装：

セット/1箱


1.パラコス プロ用 リビジョンノズル  
・リビジョンノズル 1本

2.パラコス プロ用 ショートノズル&膝プレッシャライザー  
・ショートノズル 1本  
・膝プレッシャライザー 1個


### 【使用目的又は効果】

整形外科用(骨)セメント又は人工骨インプラントを練和又は混和する器具をいう。本品は単回使用である。


### 【使用方法等】

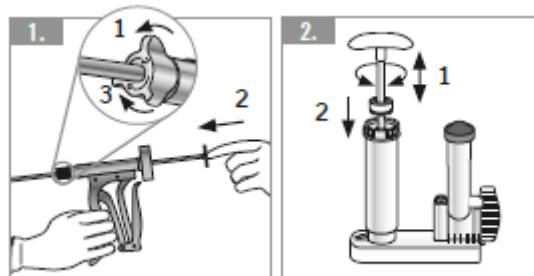


1. セメントガンのロックを解除して、ロッドを止まるまで後ろにスライドさせる。その後再度ロックをかける。
2. ミキシングロッドを2回程度動かして圧縮されている粉末をほぐし、初期位置に戻す。カートリッジに蓋を押し込む。

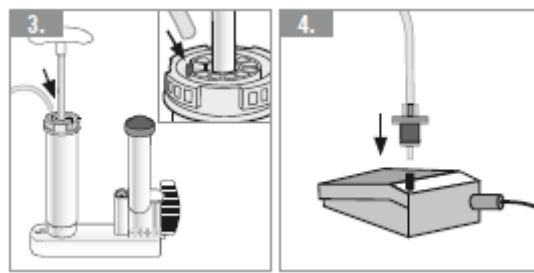


3. バキュームホースを蓋に接続する。
4. 活性炭フィルターをバキュームポンプに接続する。

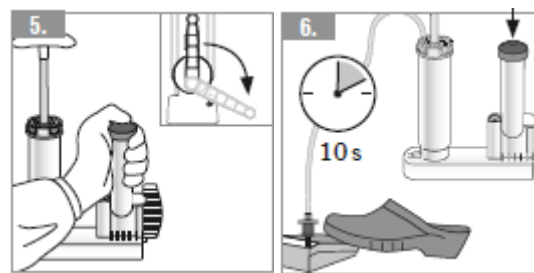


5. 左の親指で緑色の柔らかい蓋(インジケータ)を押さえた状態で、右手で緑色のレバーを完全に下げる。
6. バキュームポンプを作動させると液体モノマーが移動する。緑色の蓋(インジケータ)が収縮するとモノマーの移動は完了する(約10秒)。バキュームポンプは作動させたままにする。

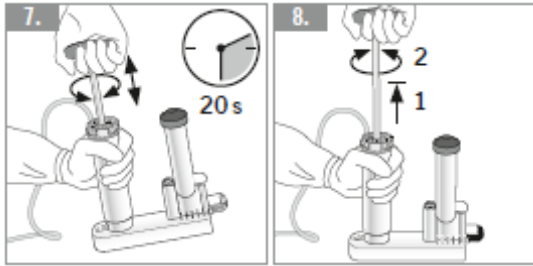


7. 生地が均質になるまで、カートリッジの全長に渡って少なくとも 20 秒間（1 秒間に 1 回のストローク）、ミキシングロッドを回転させながら上下してセメントを混合する。
8. ミキシングロッドを止まるまで引き上げ、軽く左右に回す。

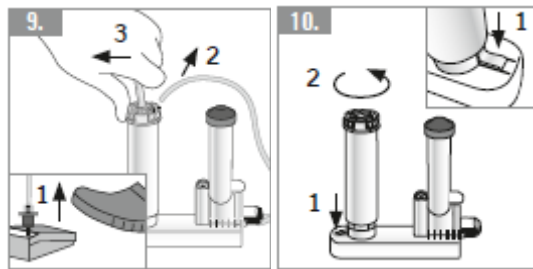


9. 真空ポンプのスイッチを切り、真空ホースを取り外す。その後ミキシングロッドを所定の破断点で折る。
10. カートリッジ固定装置を押し下げ、カートリッジをねじりながら外す。

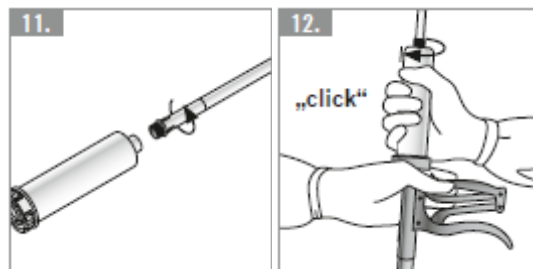

11. アプリケーションノズルをカートリッジに装着する。
12. 時計方向に回してカートリッジをセメントガンに取り付ける。

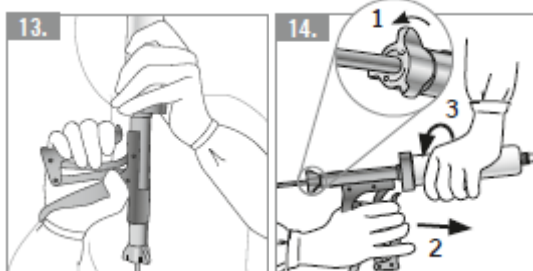

13. ノズルの先端までセメントを押し出す。
14. 使用後は、セメントガンのグリップを握りながらロックを元に戻す。その後グリップを離し、カートリッジを外す。

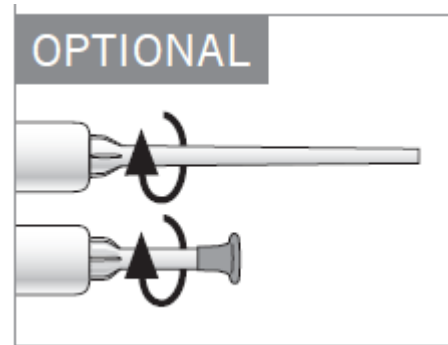

- ・ 上：本品（リビジョンノズル）を取り付けた例
- ・ 下：本品（ショートノズルと膝プレッシャライザー）を取り付けた例

**\*【保管方法及び有効期間等】**

本製品は清潔且つ乾燥した場所に保管すること。  
有効期限を過ぎて使用しないこと。滅菌済みパッケージに破損がある場合は使用しないこと。有効期限はパッケージに表示。

**【取扱い上の注意】**

本製品を機能目的以外に使用の場合、破損のおそれがある。

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：  
アクアメッドジャパン株式会社  
〒983-0868 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中 2-12  
TEL: 022-292-4050 FAX: 022-292-4080

製造業者：  
Heraeus Medical GmbH（ドイツ）

※添付文書は予告なしに変更することがあります。