


バキューム パラボウル 梱包説明（滅菌・未滅菌）



①納品状態
(袋1層目・未滅菌) 袋開口部に法定ラベルが添付されています。

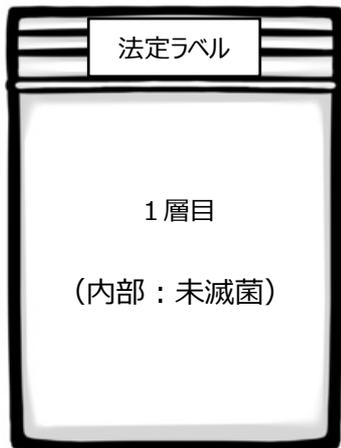

②袋2層目
裏面にあるPeel Openより白いカバーを剥がすことで開封できます。この袋の中から**滅菌状態**です。



③袋3層目（**滅菌**）
2層目の袋を開けると、中に製品が入った袋に医療機器用バーコードシールと取扱説明書が同梱されています。Peel Openより白いカバーを剥がすことで開封できます。



④袋3層目の中にバキュームパラボウルと、フットスイッチ接続用チューブ、ヘパ等が入っております。チューブ・ヘパ等が入った袋は、袋上部の開け口より開封可能です。

届出・販売名 04B1X10001000010 バキューム パラボウル